



High-Speed mit 2 Timern  
und 3 Geschwindigkeiten



PowerMix® Misch-/Dosiergerät



# Kaniedenta PowerMix®

## Power. Präzision. Perfektion.

Eine Generation voraus: Mit dem Kaniedenta PowerMix® beginnt die Zukunft schon heute. Präzisionsabformmaterialien können jetzt noch schneller angemischt werden. Selbst hochviskoses Putty wird in kürzester Zeit in blasenfreier Mischqualität ausgebracht. Durch perfekte Kombination von Funktion und Design garantiert Ihnen der Kaniedenta PowerMix® detailgetreue Präzision und passgenaue Prothetik auf Knopfdruck.

**Jetzt unverbindlichen Vorführtermin vereinbaren oder gleich bestellen!**

- Extrem schnelle Anmischgeschwindigkeit
- Elektronische Steuerung aller Funktionsabläufe
- Konstant homogene und blasenfreie Mischqualität auf Knopfdruck
- Kompatibel mit allen Comfort-Kartuschen und handelsüblichen Schlauchbeuteln
- 2 Timer für Verarbeitungszeit und Mundverweildauer
- 99 individuell programmierbare Speicherplätze
- USB-Schnittstelle für Software-Updates des integrierten Mikroprozessors
- H x B x T: 370 x 180 x 430 mm





## Multifunktions-Display



## Einfache Bedienbarkeit



## 390 ml Comfort-Kartusche



## Perfekte Kombination von Funktion und Design

Eine Generation voraus: Mit dem Kaniedenta PowerMix® beginnt die Zukunft schon heute. Präzisionsabformmaterialien in Comfort-Kartuschen oder Schlauchbeuteln können mit dem innovativen Misch- und Dosiergerät jetzt noch komfortabler und schneller angemischt werden.

Durch die perfekte Synthese von Funktion und Design garantiert der Kaniedenta PowerMix® detailgenaue Präzision und passgenaue Prothetik auf Knopfdruck.

## Benutzerfreundliches Multifunktions-Display

Das übersichtliche Multifunktions-Display dient zur elektronischen Steuerung aller Funktionsabläufe.

Zwei programmierbare Timer sorgen für eine akustische Kontrolle der Verarbeitungszeit und Mundverweildauer des jeweiligen Abformmaterials. So werden Fehler bei der Anmischung und Abformung ausgeschlossen.

Drei unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen bieten optimalen Komfort beim Befüllen von Abformlöffeln (hohe Geschwindigkeit) oder Elastomer-Spritzen (niedrige Geschwindigkeit).

## Automatische Dosierung auf Knopfdruck

Die komfortable Bedienung des Kaniedenta PowerMix® sorgt für eine erhebliche Erleichterung der täglichen Arbeit. Die Materialspende startet automatisch auf Knopfdruck.

Im Gegensatz zu anderen Geräten muss der Startknopf während der Materialspende nicht dauerhaft gedrückt werden. Somit bleiben beide Hände zum Befüllen des Abformlöffels frei.

Zum Wechseln der Kartusche drücken Sie einfach die Taste für schnellen Rücklauf.

## Innovative Comfort-Kartuschen und Mischdüsen

Die direkt befüllten 390 ml Comfort-Kartuschen werden einfach in den Kaniedenta PowerMix® gelegt und sind sofort einsatzbereit.

Die dynamische Anmischung erfolgt schnell und bequem mit den materialsparenden Kaniedenta Comfort-Mischdüsen. Die Füllstandsanzeige im Multifunktions-Display des Kaniedenta PowerMix® ermöglicht jederzeit eine exakte Kontrolle der noch vorhandenen Materialmenge.



### Schnelles Befüllen des Abformlöffels

Durch die hohe Ausbringungsgeschwindigkeit (Stufe 3) kann der Abformlöffel jetzt noch schneller und komfortabler befüllt werden als bisher. Somit steht mehr Zeit zum stressfreien Einbringen des Abformmaterials in den Mund des Patienten zur Verfügung.

Dabei garantiert die automatisierte Anmischung eine gleichbleibend hohe und reproduzierbare Mischqualität – unabhängig vom Benutzer.



### Zahn für Zahn Präzision

Ob Korrektur-, Doppelmisch-, Funktions-, Implantat- oder Transferabformung: Kaniedenta bietet Ihnen für jede Indikation die perfekte Lösung.

Selbst hochviskoses Putty wird mit dem Kaniedenta PowerMix® in kürzester Zeit in homogener und blasenfreier Mischqualität ausgebracht.

Durch permanente elektronische Kontrolle wird die Mischgeschwindigkeit – unabhängig von der Konsistenz des verwendeten Abformmaterials – jederzeit konstant gehalten.

## Umfangreiches Sortiment



### Vorprogrammierte Speicherplätze

Der Kaniedenta PowerMix® ist kinderleicht zu bedienen. Das innovative High-Tech-Gerät wird mit 5 voreingestellten Programmen geliefert, die exakt auf die Zeiten der Kaniedenta Präzisionsabformmaterialien in Comfort-Kartuschen abgestimmt sind.

Die Voreinstellungen können jederzeit geändert werden. Insgesamt stehen 99 Programm-Speicherplätze zur individuellen Einstellung der Verarbeitungszeit und Mundverweildauer zur Verfügung.

## 99 Programm-Speicherplätze

Programm	Material	Verarbeitungszeit	Mundverweildauer
P1	Dynamic® Comfort	1:45 min	3:00 min
P2	Symmetric® Comfort Putty	1:30 min	3:00 min
P3	Symmetric® Comfort	1:45 min	3:00 min
P4	Symmetric® Quick Comfort	1:15 min	2:00 min
P5	Megasil® Comfort	1:15 min	1:45 min

### Software-Update

Die Software des Kaniedenta PowerMix® kann über die USB-Schnittstelle an der Rückseite des Gerätes aktualisiert werden. So bleiben Sie auch zukünftig immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Zur Abstimmung eines unverbindlichen Vorführtermins kontaktieren Sie bitte die Kaniedenta Service-Hotline unter 0 52 21 / 34 55 12.

## USB-Schnittstelle



Telefon 052 21/34 55 0  
Telefax 052 21/34 55 11  
E-Mail: info@kaniedenta.de  
Internet: www.kaniedenta.de



**Kaniedenta GmbH & Co. KG**  
**Dentalmedizinische Erzeugnisse**

Postfach 20 22

D-32010 Herford

Praxisstempel

PowerMix®

## Faxantwort an 0 52 21/34 55 11

Ja, ich interessiere mich für den Kaniedenta PowerMix® und möchte gerne einen unverbindlichen Vorführtermin in meiner Praxis vereinbaren.

Ja, ich möchte einen Kaniedenta PowerMix® **GRATIS** erhalten bei einer Bestellung von Kaniedenta Artikeln meiner Wahl\* im Wert von 1.999,- €.

\*Die Auswahl ist auf Kaniedenta Artikel aus den Produktgruppen VPS-Präzisionsabformmaterial, Bleaching, Desinfektion, temporäres und definitives Füllungsmaterial sowie auf alle OptiMix-Spritzen begrenzt.

Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nicht mit anderen Kaniedenta Aktionsangeboten kombinierbar ist.

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Ihre Bestellung wird innerhalb Deutschlands kostenfrei zugestellt.

**Alle Bestellungen auch auf Abruf möglich.**

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Datum

Unterschrift