

Applikatorpistole für Dosierkapseln

Verwendungszweck

Die ergonomisch geformte Applikatorpistole für Dosierkapseln (Abb. 1) ist zur intraoralen Abgabe von Einkomponenten-Dentalmaterialien (z. B. lichthärtender Composite, Retraktionspaste) aus Dosierkapseln bestimmt. Dies ist ein wiederverwendbares Produkt.



Indikationen

Applikation von Materialien in Dosierkapseln (z.B. Avantgarde Caps).

Leistungsbeschreibung

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Nur für den professionellen zahnärztlichen/ zahntechnischen Anwender.

Allgemeine Information

Dieser Dispenser wird unsteril geliefert.

Anwendung (siehe Abb. 2 und 3)

Zum Einsetzen oder Auswechseln der Dosierkapsel muss der weiße Kunststoffring nach hinten geschoben werden. Dann kann die Dosierkapsel leicht eingelegt werden (Abb. 2). Den Ring anschließend langsam loslassen.

Nun kann das Material bequem und sicher appliziert werden. Das Material sollte sich leicht aus der Dosierkapsel herausdrücken lassen. Dazu die Applikatorpistole für Dosierkapseln mit einer gleichmäßigen Bewegung betätigen (Abb. 3). Keine übermäßige Kraft anwenden! Übermäßige Kraftanwendung kann zu unkontrolliertem Materialfluss oder zum Herausspringen der Dosierkapsel führen. Gegebenenfalls einen neue Dosierkapsel verwenden.

Nach dem Beenden Applikation den weißen Kunststoffring nach hinten schieben und die Dosierkapsel aus der Applikatorpistole entnehmen.



Warnhinweise/Sicherheitshinweise

- Das Material nicht zu schnell aus der Dosierkapsel herausdrücken.
- Bei der Betätigung des Hebels keine übermäßige Kraft anwenden.
- Vor jeder Verwendung die Funktionsfähigkeit (Leichtgängigkeit) der Applikatorpistole für Dosierkapseln überprüfen.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Aufbereitungsanweisung gemäß EN ISO 17664

Wiederaufbereitung

Eine Demontage der Applikatorpistole für Dosierkapseln ist nicht erforderlich.

Warnhinweise

Bitte befolgen Sie die landesspezifischen Vorschriften zu Hygienestandards sowie Reinigung/Desinfektion von medizinischen Vorrichtungen in Zahnarztpraxen.

Einschränkungen bei der Aufbereitung

- Jede Applikatorpistole für Dosierkapseln, die sichtbaren Schäden oder Abnutzung aufweist, darf nicht mehr verwendet werden.
- Das Ende der Lebensdauer einer wiederverwendbaren Applikatorpistole wird in der Regel durch Abnutzung und gebrauchsbedingte Schäden bestimmt.
- Die Nutzungsdauer der Applikatorpistole ist überschritten, wenn bei der Sichtprüfung unannehmbare Verschlechterungen wie Abnutzung, Verfärbung, Knackgeräusche usw. festgestellt werden.

Hinweise nach Verwendung

- Die Applikatorpistole für Dosierkapseln sofort mit einem nicht fußelnden Zellstofftuch abwischen.
- Für den Transport in den Reinigungs- und Sterilisationsbereich die Applikatorpistole für Dosierkapseln in einen geeigneten Transportbehälter oder direkt in eine Lösung aus Reinigungs- und Desinfektionsmittel legen.

Vorbereitung

Für die Reinigung und Desinfektion geeignete Handschuhe, wasserabweisende Schürze und Schutzbrille tragen.



Manuelle Reinigung

- Die Reinigungslösung gemäß Herstellerangaben vorbereiten.
- Die Applikatorpistole für Dosierkapseln vollständig in die Reinigungslösung eintauchen. Bei den nachfolgenden Schritten die Applikatorpistole für Dosierkapseln eingetaucht lassen, um ein Verspritzen der kontaminierten Flüssigkeit zu vermeiden.
- Kritische Bereiche der Applikatorpistole mit einer weichen Bürste 1 Minute lang reinigen.
- Alle beweglichen Teile der Applikatorpistole für Dosierkapseln mehrmals in der Reinigungslösung betätigen.
- Die Applikatorpistole für Dosierkapseln muss mindestens 5 Minuten in der Reinigungslösung verbleiben.
- Zur vollständigen Entfernung der Reinigungslösung anschließend die Applikatorpistole für Dosierkapseln unter fließendem Leitungswasser (Trinkwasserqualität) abspülen. Dabei alle beweglichen Bauteile mehrmals betätigen.

Die Applikatorpistole für Dosierkapseln auf Sauberkeit prüfen und ggf. alle oben beschriebenen Schritte wiederholen.

Manuelle Desinfektion

Eine Desinfektion mit Alkohol bzw. Desinfektionsmitteln die 1,5 % Glutaraldehyd enthalten ist möglich (max. 1 Stunde).

- Das Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben vorbereiten.
- Die Applikatorpistole für Dosierkapseln vollständig in die Desinfektionslösung eintauchen. Bei den nachfolgenden Schritten die Applikatorpistole für Dosierkapseln eingetaucht lassen, um ein Verspritzen der kontaminierten Flüssigkeit zu vermeiden.
- Alle beweglichen Teile der Applikatorpistole für Dosierkapseln mehrmals in der Desinfektionslösung betätigen.
- Für die Kontaktdauer mit der Desinfektionslösung die Herstellerangaben beachten.
- Zur vollständigen Entfernung der Desinfektionslösung anschließend die Applikatorpistole für Dosierkapseln unter fließendem Leitungswasser (Trinkwasserqualität) abspülen. Dabei alle beweglichen Bauteile mehrmals betätigen.
- Mit einem fusselfreien Tuch abreiben und/oder mit sauberer Druckluft trocknen.

Trocknen

Lassen Sie die Applikatorpistole trocknen, bis sie sichtbar trocken ist.

Pflege und Prüfung

Die Applikatorpistole bei normaler Beleuchtung inspizieren:

- Jede Applikatorpistole, die sichtbaren Schäden oder Abnutzung aufweist, darf nicht mehr verwendet werden.
- Die manuelle Reinigung und Inspektion ist zu wiederholen, wenn die Applikatorpistole sichtbar nicht sauber ist.

Sterilisation

Die Applikatorpistole für Dosierkapseln kann mittels Heißdampfs (Sterilisationsdauer 3 Minuten bei 134°C) sterilisiert werden.

- Applikatorpistole für Dosierkapseln in die Sterilisationskammer legen.
- Sterilisationsprogramm starten.
- Applikatorpistole für Dosierkapseln nach Ablauf des Sterilisationsprogramms entnehmen und abkühlen lassen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen, behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU-Medizinprodukte Verordnung, die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lieferformen

Art.-Nr.	Artikel
31300	Applikatorpistole für Dosierkapseln

Garantie

Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH-Produkte keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Gewährleistung für die Applikatorpistole für Dosierkapseln endet nach Ablauf von 2 Jahren, ab Lieferdatum.