

Kanibite Extrem, pink, Shorehärte: 61 D

Das weltweit härteste Bissregistrat, auf A-Silikon Basis

Allgemeines

Kanibite Extrem bietet maximalen Komfort durch die zeitsparende, schnelle und einfache Applikation aus der Sicherheitskartusche. Das Vinylpolysiloxan wird in der Sicherheitskanüle automatisch blasenfrei gemischt und direkt auf die Zahnreihen appliziert. Beim Kieferschluss des Patienten leistet Kanibite Extrem aufgrund seiner Viskosität nur sehr geringen Widerstand, wodurch Bissverschiebungen vermieden werden. Die hohe Thixotropie von Kanibite Extrem verhindert ein Einfließen des Materials in die Interdentalräume. Durch die kurze Mundverweildauer und das angenehme Kirscharoma wird der Stress für den Patienten minimiert.

Kanibite Extrem federt nicht bei der Reposition und garantiert somit eine exakte Lagefixierung der Gipsmodelle im Artikulator. Registerate aus Kanibite Extrem sind ohne Schrumpfung über Monate hinweg lagerfähig. Dimensionsveränderungen beim Transport oder durch hohe Temperaturen sind ausgeschlossen.

Anwendungsgebiet

Kanibite Extrem ist ein spritzbares, extrem hartes A-Silikon für die Bissregistrierung, das auch in der Schlussbissstellung verwendbar ist. Kanibite Extrem kann weiterhin als Schlüsselmaterial, z.B. für intraorale Stützstifte oder für die Bissgabeltechnik verwendet werden.

Vorbereitung der Sicherheitskartusche

Den Verschluss der Kanibite Extrem Sicherheitskartusche entfernen. Neue Sicherheitskanüle aufsetzen und die benötigte Materialmenge auspressen. Die gebrauchte Sicherheitskanüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschluss. Hierdurch wird eine unbeabsichtigte Kontamination von Basis- und Katalysatorpaste vermieden.

Bissregistrierung

Vor der Anwendung von Kanibite Extrem die Applikationsflächen sorgfältig trocknen. Das A-Silikon anschließend direkt auf die zu registrierenden Okklusalfächen applizieren. Nach spätestens 30 Sekunden sollte der Kieferschluss erfolgen. Nach ca. 45 Sekunden im Mund ist Kanibite Extrem ausgehärtet und kann entnommen werden. Prüfen Sie die Aushärtung des Bissregistrates vor der Mundentnahme. Keine Materialreste im Sulcus belassen.

Desinfektion und Lagerung (Bissregistrat)

Das ausgehärtete Kanibite Extrem Bissregistrat kann mit allen handelsüblichen Desinfektionslösungen desinfiziert werden. Wegen der hohen Härte von Kanibite Extrem ist darauf zu achten, dass auf den Gipsmodellen störende Gipsperlen oder andere Ungenauigkeiten sorgfältig radiert werden.

Lagerung (der Sicherheitskartusche)

Kanibite Extrem trocken und kühl (nicht über 25 °C) lagern. Bei Raumtemperatur beträgt die Lagerfähigkeit von Kanibite Extrem 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Das Haltbarkeitsdatum ist auf den Etiketten aufgedruckt. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.

Zusammensetzung

Vinylpolysiloxan, Siliziumdioxid, Platinkatalysator, Paraffin, Tenside und in geringen Mengen Stabilisatoren und Additive.

Wichtige Hinweise

Bestimmte Handschuhtypen (z.B. aus Latex) können den Aushärtungsprozess beeinträchtigen. Ebenso können gewisse Präparate wie z.B. Mundspüllösungen den Abbindeprozess verhindern. Bisher sind keine Nebenwirkungen von Kanibite Extrem bekannt. Bei Allergien gegen einen der Inhaltstoffe Kanibite Extrem nicht mehr verwenden. Material nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Die angegebenen Zeiten basieren auf einer Raumtemperatur von 23 °C. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Abbindezeiten.

Technische Daten

Erhärtungszeit (ab Mischbeginn)	1:15 Min.
Verarbeitungszeit	30 Sek.
Shore D (24 h)	61
Empfohlene Zeit im Mund	45 Sek.
Dimensionsveränderung (24 h)	< 0,5 %
Verformung unter Druck	< 0,6 %
Geschmack	Kirsche

Material und Lieferformen

Art.-Nr.	Artikel
13001	Kanibite Extrem Bissregistrat, pink Sicherheitskartusche, 50 ml
2991	Sicherheitskanüle, grün, 50 Stück
2996	Applikationstips, Beutel à 50 Stück
2990	Sicherheits-Mischpistole

