



# Re-Cord<sup>®</sup>

Gewebeschonende Retraktionspaste  
zur temporären Sulkuserweiterung

## Gebrauchsinformation



Medizinprodukt



## Allgemeines:

**Re-Cord®** ist eine gewebeschonende Retraktionspaste mit Apfelaroma, die zur vorübergehenden Retraktion der marginalen Gingiva und zur temporären Öffnung des Sulkus indiziert ist. **Re-Cord®** wird direkt aus der Dosierkapsel in den Sulkus appliziert. Die feine, biegbare Applikationsspitze der **Re-Cord®** Dosierkapsel ermöglicht eine einfache Platzierung der Retraktionspaste auch in schwer zugänglichen approximalen Bereichen. Zur Ausbringung der **Re-Cord®** Paste können handelsübliche Applikatorpistolen verwendet werden.

Durch Kompression der **Re-Cord®** Paste wird ein hämostatischer Effekt auf das Zahnfleisch erzielt. Das in **Re-Cord®** enthaltene Kaolin absorbiert orale Flüssigkeiten und sorgt nach einer Einwirkzeit von 2 Minuten für einen trockenen und sauberen Sulkus. Entsprechend der klinischen Situation und individuellen Arbeitstechnik kann die **Re-Cord®** Paste als Alternative oder in Kombination mit konventionellen Retraktionsfäden benutzt werden.

## Indikation:

Zur vorübergehenden marginalen Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus vor zahnärztlichen Abformungen präparierter Zähne bei gesundem Parodont.

## Kontraindikation:

Die Anwendung der **Re-Cord®** Retraktionspaste bei fortgeschrittenen Parodontopathien, freiliegenden Furkationen oder exponiertem Knochen ist kontraindiziert. Bei Kontaktallergien oder bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf **Re-Cord®** nicht verwendet werden.

## Anwendung:

- Zahn wie erforderlich präparieren.
- **Re-Cord®** Dosierkapsel erst unmittelbar vor der Anwendung aus der Folienverpackung nehmen.
- **Re-Cord®** Dosierkapsel in eine geeignete Applikatorpistole einsetzen und den korrekten Sitz überprüfen.
- Der Applikationswinkel der **Re-Cord®** Dosierkapsel ist individuell einstellbar. Die flexible Applikationsspitze bei Bedarf mit minimalem Kraftaufwand vorsichtig in die erforderliche Position biegen. Vorsicht: Applikationsspitze nicht zu stark biegen, um einen unbeabsichtigten Bruch der **Re-Cord®** Dosierkapsel zu vermeiden.
- Eine geringe Menge der **Re-Cord®** Retraktionspaste auf einen Anmischblock ausbringen und verwerfen.
- Optional: Sofern es die klinische Situation erfordert, einen Retraktionsfaden in den Sulkus einbringen.
- Vor der Anwendung der Paste den Sulkus mit Wasser spülen und sanft mit Luft trocknen.
- **Re-Cord®** Retraktionspaste langsam und gleichmäßig um den Zahn herum in den Sulkus applizieren, bis der Sulkus vollständig gefüllt ist. Bei Bedarf Kompressionskappen, -hüte oder andere Kompressionsprodukte benutzen.
- Vorsicht: Durch übermäßige Kraftanwendung und ruckartige Bewegungen können beim Auspressen Gefahrensituationen entstehen. Bei der Applikation von **Re-Cord®** aus der Dosierkapsel deshalb nur leichten, gleichmäßigen und kontrollierten Druck ausüben, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- **Re-Cord®** Retraktionspaste ca. 2 Minuten einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu ermöglichen. Während der Einwirkzeit den behandelten Bereich unbedingt trocken halten.
- Vorsicht: Eine zu lange Einwirkzeit der **Re-Cord®** Retraktionspaste kann zu Irritationen und Gewebeschädigungen führen. Einwirkzeit nicht überschreiten.
- Anschließend **Re-Cord®** Retraktionspaste mit Hilfe eines Wasser/Luft-Gemisches und einem Absauger vollständig aus dem Sulkus und Mundbereich entfernen.

- **Vorsicht:** Die Retraktionspaste darf nicht vom Patienten geschluckt werden!
- Reste der Paste können zur Verzögerung der Abbindung und zu Ungenauigkeiten des Präzisionsabformmaterials führen. **Re-Cord®** Paste vor der Abformung vollständig entfernen.
- Gingiva mit Luft trocknen und das Retraktionsergebnis kontrollieren. Falls eine stärkere Retraktion gewünscht ist, **Re-Cord®** erneut in den Sulkus applizieren, einwirken lassen und vollständig entfernen. Gegebenenfalls zusätzlich einen dünnen Retraktionsfaden verwenden.
- Nach vollständiger Entfernung der **Re-Cord®** Paste kann mit der Präzisionsabformung begonnen werden.

### **Einwirkzeit:**

Die Einwirkzeit der **Re-Cord®** Retraktionspaste beträgt 2 Minuten.

### **Lagerung/Entsorgung:**

**Re-Cord®** bei 15 °C bis 25 °C trocken lagern. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

### **Zusammensetzung:**

Kaolin, Aluminiumchlorid Hexahydrat, Wasser, Additive.

### **Wichtige Hinweise:**

- Für die professionelle Anwendung durch zahnärztliches Fachpersonal, bei Patienten, die zahnmedizinisch behandelt werden.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die zusammen mit **Re-Cord®** verwendet werden, sind zu beachten.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtschutz tragen.
- Nur für den einmaligen Gebrauch. Reste in der **Re-Cord®** Kapsel verwerfen.
- Einwirkzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.
- Hautkontakt mit **Re-Cord®** vermeiden. Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkontakts die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Augenkontakt mit **Re-Cord®** vermeiden. Bei unbeabsichtigtem Augenkontakt sofort mit viel Wasser gründlich ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Gegebenenfalls einen Augenarzt konsultieren.
- Bisher sind keine Nebenwirkungen von **Re-Cord®** bekannt. Das Restrisiko einer eventuellen Hypersensibilität gegen einzelne Komponenten des Materials kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten entsprechende Reaktionen auftreten, ist der Gebrauch von **Re-Cord®** einzustellen.
- Alle in Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Re-Cord®** wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss entsprechend dieser Gebrauchsinformation angewendet werden. Da die sachgemäße Anwendung von **Re-Cord®** außerhalb unserer Kontrolle erfolgt, liegt diese ausschließlich in der Verantwortung des Behandlers. Unsere Hinweise befreien Sie nicht davon, **Re-Cord®** eigenverantwortlich auf die Eignung für bestimmte Anwendungszwecke zu prüfen. Für Schäden, die sich aus anderweitiger oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, wird keine Haftung übernommen.

## Materialien und Lieferformen:

Art.-Nr.	Artikel
11060	<b>Re-Cord® Normalpackung</b> Gewebeschonende Retraktionspaste zur temporären Sulkuserweiterung 20 Dosierkapseln à 370 mg
11070	<b>Re-Cord® Sparpackung</b> Gewebeschonende Retraktionspaste zur temporären Sulkuserweiterung 50 Dosierkapseln à 370 mg
31300	<b>Applikatorpistole für Dosierkapseln</b>

Version G11060/001, Stand 24.08.2021



**Kaniedenta**  
**Herstellungsgesellschaft mbH**  
Zum Haberland 36  
D-32051 Herford

Telefon 0 52 21 - 34 55 0  
Telefax 0 52 21 - 34 55 11  
info@kaniedenta.de  
www.kaniedenta.de

