

Relino Hart Unterfütterung

Hartes Prothesenunterfütterungsmaterial in der Sicherheitskartusche

Produktbeschreibung

Das Löffeladhäsiv für Silikone ist ein dünnfließendes, lufttrocknendes Einkomponentenmaterial zur Verbesserung der Haftung zwischen Abformlöffel und Silikonmaterialien. Das Adhäsiv kann für jede Art von Polysiloxan (kondensationsvernetzendes und additionsvernetzendes Silikon) verwendet werden. Es eignet sich sowohl für konfektionierte Metall- und Methacrylatlöffeln als auch für individuell gefertigte Abformlöffel.

Indikationen

Haftvermittler für Abformlöffel.

Leistungsbeschreibung

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Produktes ist die Verwendung des Produktes kontraindiziert.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Nur für den professionellen zahnärztlichen/ zahntechnischen Anwender.

Anwendung

Abformlöffel säubern, trocknen und gegebenenfalls entfetten. Adhäsiv mit dem beigefügten Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht auf die trockene und fettfreie Innenfläche des Löffels auftragen. Hinweis: Durch zu reichliche Verwendung von Adhäsiv verringert sich die Haftfähigkeit! Haftvermittler 3 Minuten trocknen lassen, ehe der Abformlöffel beschickt wird.

Reinigung und Desinfektion

Rückstände vom Adhäsiv lassen sich am besten mit dem Instrumenten- und Löffelreiniger Traycleaner (Art. 1832) vom Abformlöffel entfernen. Anschließend den Löffel mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln wie z.B. Kanisept AF 1,5% (Art. 1889) wie üblich desinfizieren. Die Angaben des Herstellers des Desinfektionsmittels sind zu beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

Nicht über 25 °C lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Wichtige Hinweise

- Augen- und Hautkontakt vermeiden, gegebenenfalls mit viel Wasser ausspülen. Dämpfe nicht einatmen!

- In gut belüfteten Räumen verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Flasche sofort nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Das Restrisiko einer eventuellen Hypersensibilität gegen einzelne Komponenten des Materials kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

An Löffeln aus anderen Kunststoffen und individuellen Löffeln aus Basisplatten bewirkt das Adhäsiv nicht immer ausreichende Haftung. Für Polyether-Abformmassen muss ein Polyether-Adhäsiv verwendet werden.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen, behördlichen Vorschriften

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU-Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lieferformen:

Art.-Nr.	Artikel
2331	Relino Hart Unterfütterung 50 ml Sicherheitskartusche
2330	Relino Hart Sparpackung 50 ml Sicherheitskartusche

Garantie

Die Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Kaniedenta Produktionsgesellschaft mbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

