

## Tetrachrom® mega KFO, normalabbindend

### Präzisionsalginat mit 3-Phasen Farbindikator DIN EN 21563

#### Dosierung

Für einen mittleren Abdruck benötigt man:

2 Messlöffel Pulver	(14 g)
2/3 Messbecher Wasser	(30 ml)

Für einen großen Abdruck benötigt man:

3 Messlöffel Pulver	(21 g)
1 Messbecher Wasser	(45 ml)

#### Verarbeitungszeit

Anmischzeit (maschinell):	12-14 Sek.
Anmischzeit (manuell):	45 Sek.
Verweildauer im Mund:	30 Sek.
Abbindezeit:	2 Min.

#### Farbindikator während der Verarbeitung

1. Violette Phase	Tetrachrom® anmischen.
2. Rosa Phase	Tetrachrom® auf den Löffel geben.
3. Rosa Phase	Einsetzen in den Mund.
4. Beige Phase	Beginn des Abbindeprozesses.

#### Gebrauchsinformation

Besondere Maßnahmen vor der Anwendung sind nicht erforderlich. Beutel vorsichtig öffnen und Alginatpulver entnehmen. Geben Sie das Alginatpulver ins Wasser und mischen Sie es gründlich. Zur exakten Dosierung von Pulver und Wasser ausschließlich die von Kaniedenta gelieferten Dosierhilfen verwenden. Die Verwendung fremder Dosierhilfen kann ggf. zu falschen Mischungsverhältnissen und fehlerhaften Abformungen führen.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungszeiten. Die angegebenen Zeiten basieren auf Messungen mit destilliertem Wasser bei einer Temperatur von 23 °C. Bei maschineller Anmischung sind die Anweisungen des Geräteherstellers zu beachten. Im Mischgerät wird der sparsame Gebrauch von Wasser empfohlen. Schwankungen beim Mischungsverhältnis sowie der Drehzahl, Reibung, Wasserhärte oder Temperatur können zu Abweichungen bei der Anmisch- und Abbindezeit führen. Der 3-Phasen-Farbindikator ermöglicht dabei eine visuelle Zeitkontrolle.

Alginatabformung nach der Entnahme aus dem Mund sorgfältig unter fließendem Wasser säubern und mit handelsüblichen Desinfektionslösungen desinfizieren. Anschließend Abdruck ausgießen oder in einem luftdichten Plastikbeutel aufbewahren. Mit Tetrachrom® hergestellte Präzisionsabformungen sind bis zu 100 Stunden dimensionsstabil lagerbar.

#### Kontraindikationen / Warnhinweise

Zur professionellen Anwendung durch zahnärztliches Fachpersonal bei Patienten, die zahnmedizinisch behandelt werden. Verwenden Sie dieses Alginat nicht bei Patienten, die allergisch auf Minze-Geschmacksstoffe reagieren. Das Alginatpulver ist staubfrei, dennoch ist das Einatmen oder Verschlucken zu vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, weiter ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Das Restrisiko einer eventuellen Hypersensibilität gegen einzelne Komponenten des Materials kann nicht ausgeschlossen werden. Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

#### Lagerung / Haltbarkeit

Tetrachrom® im luftdicht verschlossenen Behältnis kühl und trocken lagern. Aufbewahrungsbehälter nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Lieferform

Art.-Nr.	Artikel
1150	Tetrachrom® mega KFO, normalabbindend 500 g Beutel
1005	Dosierbesteck weiß, für Tetrachrom® 1 x Wasserbecher mit Dosierskala 1 x Dosierlöffel für Alginatpulver

