

Pro-Fit C

Provisorische Verschlussmasse

Patientenzielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Patienten.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt.

Zusammensetzung

Qualitative Angaben:

Calciumsulfat, Zinkoxid, Ethylcellulose

Quantitative Angaben:

60 % Calciumsulfat

15 % Zinkoxid

Zweckbestimmung des Produktes

Für temporäre Füllungen.

Indikationen

Provisorischer, kurzzeitiger Verschluss von Zahnkavitäten.

Kontraindikationen

Keine

Leistungsmerkmale des Produktes

Verschlussmasse, selbsthärtend.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen

Keine

Anwendung

Mit einem Füllungsinstrument die benötigte Menge Pro-Fit C in die feuchte Kavität applizieren. Die Erhärtung beginnt nach wenigen Minuten. An exponierter Stelle ist eine Schonung von 15 Minuten empfehlenswert. Tiefe Kavitäten brauchen nicht voll ausgefüllt zu werden, was die spätere Entfernung erleichtert. Beim Verschluss von Einlagen auf eine möglichst drucklose Applikation achten.

Zur Entfernung des abgebundenen Pro-Fit C eignet sich am besten eine spitze, kurze und kräftige Sonde, die zwischen Dentin und Verschluss eingeführt wird.

Warnhinweise

Restrisiken

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsinformation beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Nebenwirkungen

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Wechselwirkungen

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung

Nach jeder Materialentnahme Behälter sofort verschließen. Haltbarkeit der geschlossenen Verpackung: siehe Etikett.

Nach dem erstmaligen Öffnen ist das Präparat mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden.




Mindesthaltbarkeit

Pro-Fit C nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Hinweise zu Pro-Fit C:

Farbabweichungen von rosa stellen keinen Mangel dar und haben keinerlei Einfluss auf die Funktion, Gebrauchstauglichkeit sowie Sicherheit des Produktes.

Varianten

	Art.-Nr.	Artikel
	2920	Pro-Fit C Einzelpackung 2 x Schraubgläser à 30 g
	2921	Pro-Fit C Normalpackung 6 x Schraubgläser à 30 g
	2922	Pro-Fit C Sparpackung 12 x Schraubgläser à 30 g

Entsorgung

Nicht verwendetes Material kann dem Haushaltsmüll zugeführt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

H315 verursacht Hautreizungen

H319 verursacht schwere Augenreizung



Achtung

H411 giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Made in Germany



 Dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH; Schusterring 35; 25355 Barmstedt/Germany

